


監修：山口大学医学部附属病院 薬剤部 准教授  
尾家重治

## 薬杯・すいのみ

▶ 薬杯や、すいのみは使用のつど、水洗いと消毒を行きましょう。◀

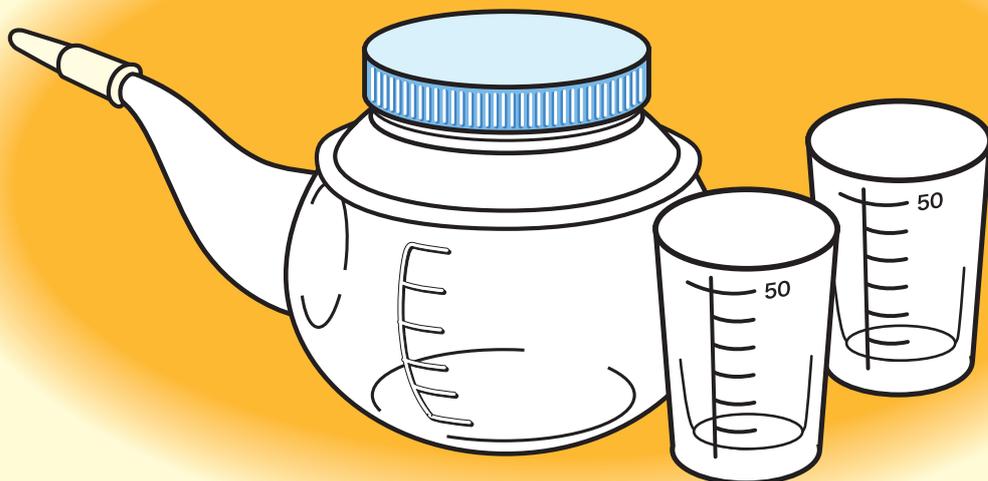

### 洗浄

薬杯・すいのみは使用后、よく洗ってください。

- すいのみは、使用のつど、吸い口を外し、内部は専用ブラシでしっかり洗浄してください。



- 専用ブラシも使用後、よく洗い十分に乾燥させてください。できれば、2本用意して1日ごとに交換して使用することをお勧めします。

- 薬杯も、使用のつど、しっかり洗いましょう。

### 消毒

洗浄後、ミルトン80倍希釈液に浸けます。

- 薬杯やすいのみ内に空気が残らないよう、ミルトン希釈液に浸し、1時間以上浸け置きしてください。



- 消毒終了後、よく乾燥させて保管してください。

※消毒後の水洗いは行っても行わなくてもどちらでも結構です。

### 保管

