


介護器具の消毒方法

Kyorin C)

監修:山口大学医学部附属病院 薬剤部 准教授
尾家重治

経管栄養セット


► 経管栄養のバッグとチューブは、使用のつど、水洗いと消毒を行いましょう。◀

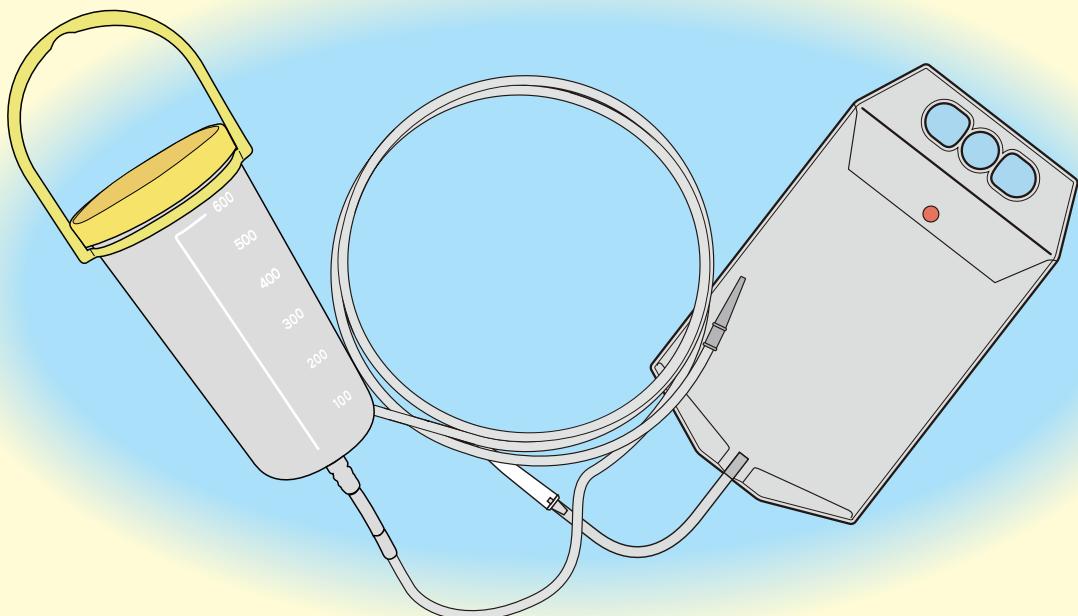

洗浄

経管栄養使用後は
よく洗ってください。

- 使用した後は、
汚れが残らないよう
に水で2~3回
すすいでください。

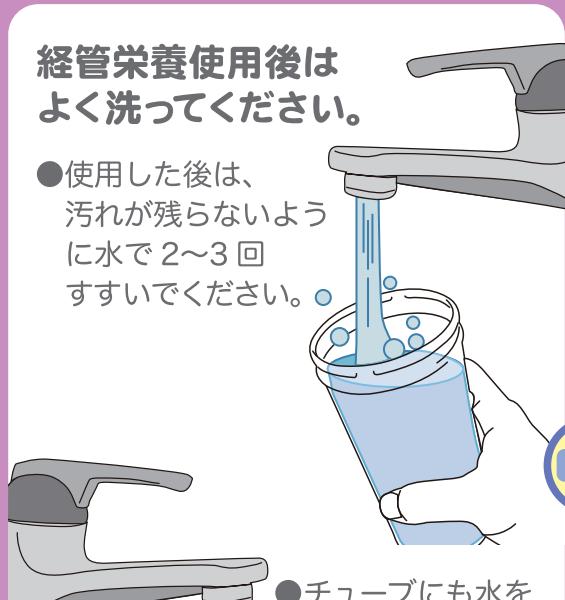

- チューブにも水を
2~3回通し、
汚れを落とします。



消毒

洗浄後、ミルトン80倍希釈液に
浸けます。

- チューブ内に一度、
ミルトン希釈液を通し、
そのまま全体をミルトン
希釈液に浸けます。
- 全体が希釈液に
浸かっていることを
確認してください。



※使うときはミルトン液
から取り出し、よく振り切っ
てからご使用ください。

保管

次に使うまで
浸けておく



こんな器具類は消毒が必要です。

	消毒の方法	
	熱湯消毒	塩素系消毒剤 につける
軽管栄養の バッグ・チューブ		●
ネプライザーの 薬液カップ、蛇管		●
薬杯、すい飲み		●
おしぶり	●	●
まな板	●	●
調理器具	●	

ミルトン80倍希釈液の作り方

ミルトン専用容器の 場合…

専用容器にミルトン50mLを入れ、4Lの水位線まで水を入れれば80倍希釈液の完成です。上部の裏面計量部分で50mLが計量できます。

その他の容器の 場合…

ミルトン50mL(1Lボトルのキャップで、2.5杯)に水を加え4Lの希釈液を作ります。



ミルトンを正しくお使い頂くために

POINT 1

器具が十分消毒液に
浸かっている事を
確認しましょう。



POINT 2

消毒をする前には、十分に
洗浄し、しっかり汚れを
落としておきましょう。



POINT 3

浸泡置きに使う容器は、遮光性
の高い容器を使用し、
できればフタのできる
物をお使いください。



- 他の洗剤や消毒剤との混合はしないでください。
- ステンレスを含む金属製品の消毒には使用しないでください。
- 手の荒れやすい人は炊事用手袋をご使用ください。

衛生器具・ガーゼ・器具の消毒に

★幅広い微生物に対し消毒・殺菌効果を示します。

★有機物に接触すると塩化ナトリウムに分解し低残留です。



ミルトン

ミルトンについてのご質問は
☎ 0120-093610

第2類医薬品

※使用上の注意、効能、用法/用量等は
説明文書をお読みください。

杏林製薬株式会社

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地